


GUÍA DE DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA DE ARCHIVOS CAD DE LAS INTERFASES DINÁMICAS 3.0 PARA 3SHAPE

3shape 




1. Solicitar los archivos al siguiente mail: spain@dynamicabutment.com incluyendo sus datos de contacto. Entrar en el Dropbox facilitado por Dynamic Abutment Solutions y copiar la carpeta “DAS_3SHAPE_V5.rar” (V5 puede variar dependiendo de la versión)

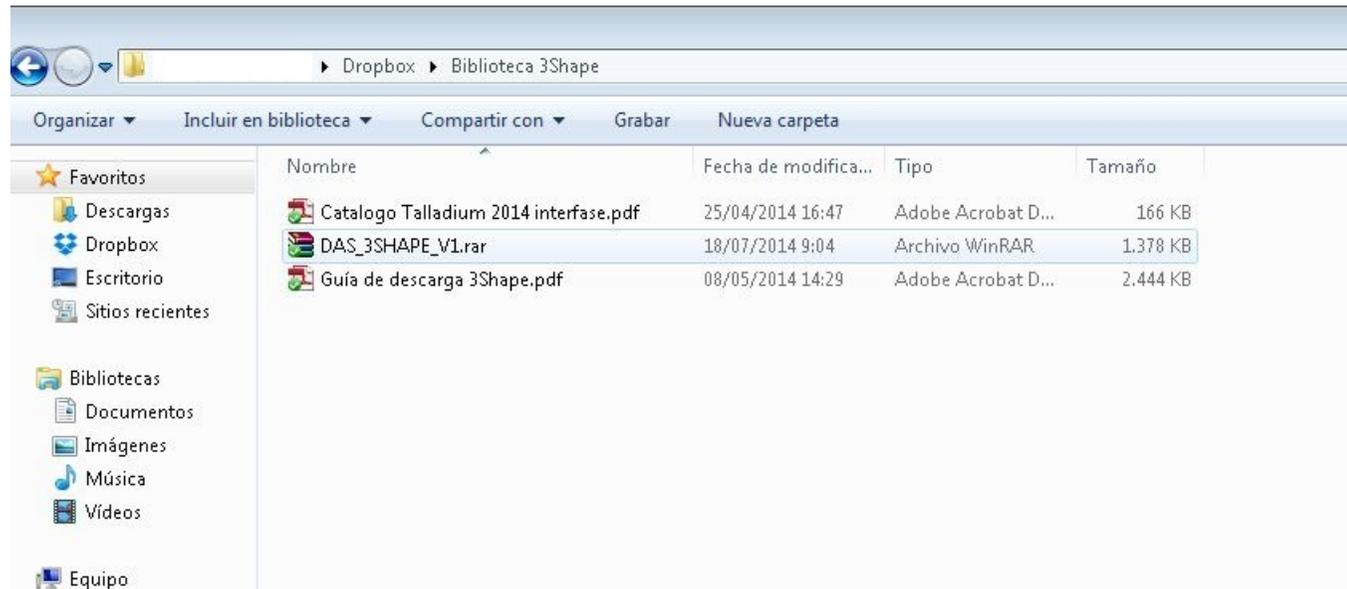


2. Pegar el archivo .rar y descomprimirlo en el sitio que desee, como por ejemplo en el escritorio, y obtendrá la carpeta “DAS_3SHAPE_V5”.



3. Cuando el archive se haya descomprimido, observar que la carpeta descomprimida contiene el archive “DAS_3SHAPE_V5.dme”, que es un único archive que contiene los components para 3SHAPE.

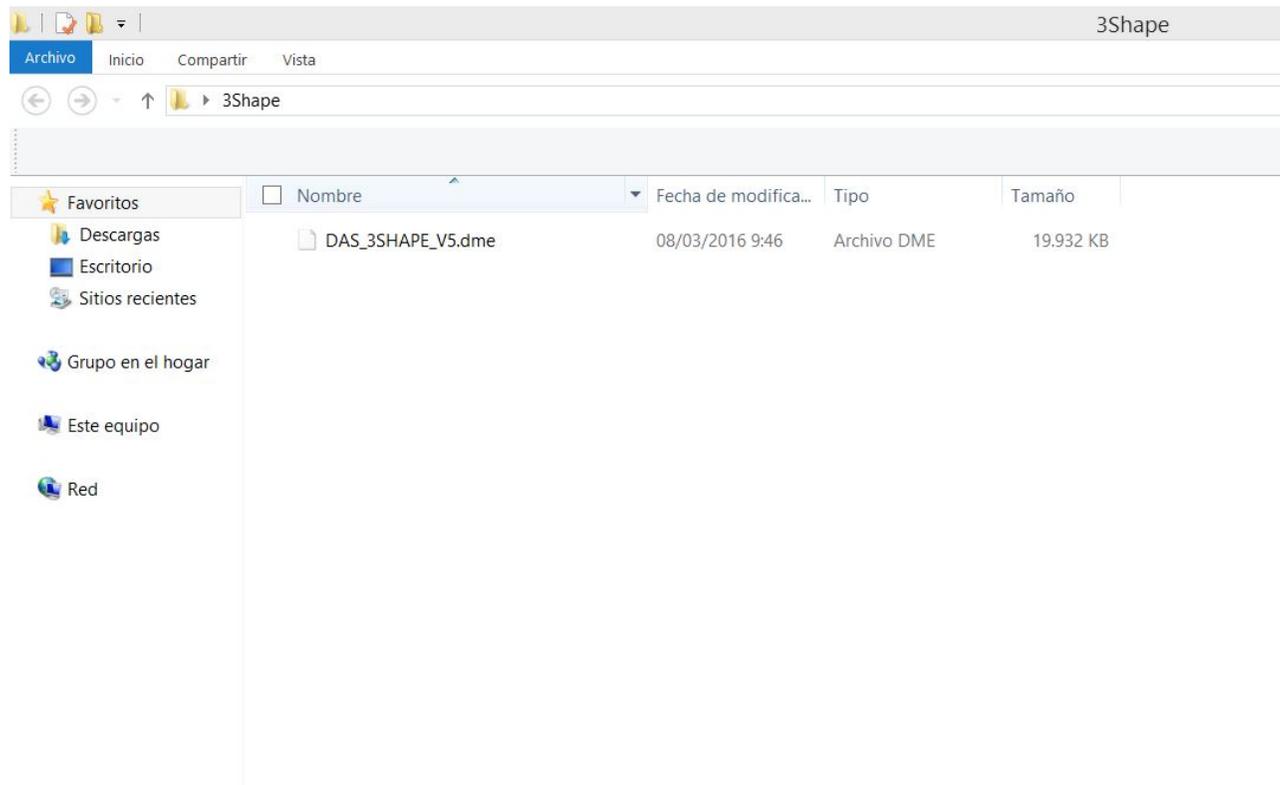

4. Importar el programa 3SHAPE Dental System e ir a Tools Import/Export.

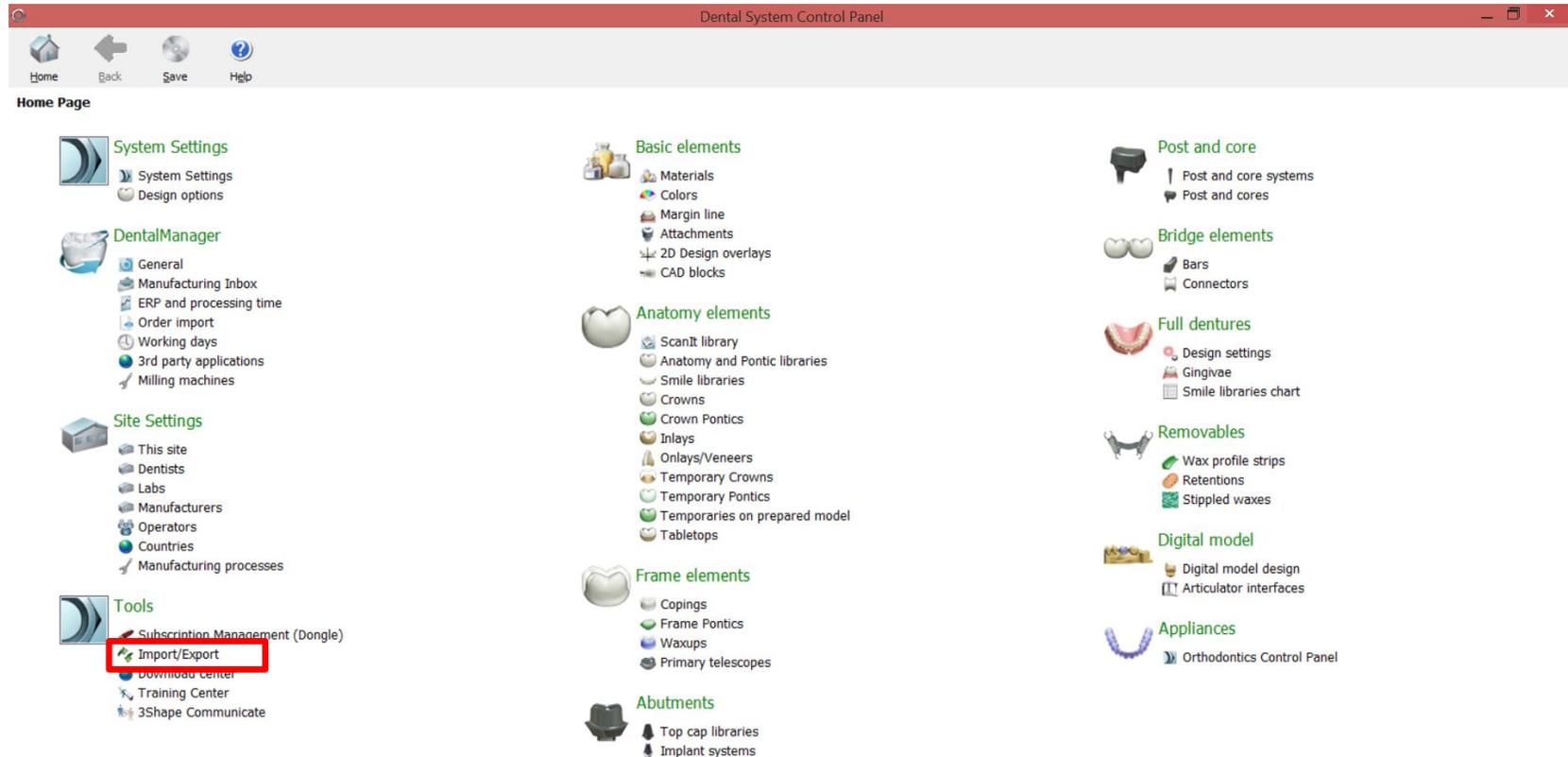

5. Seleccionar Import Materials.

Dental System Control Panel - Export/Import Materials

Home Back Save Help

Tools > Import/Export

Tasks

- Export materials
- Import materials

Import materials

To import new materials, click on "Import materials" and browse the desired file (extension ".dme"). Then select the materials from the list that appeared on a screen and click "Import". Typically it is recommended to select all. You can also download the materials directly from FTP - go to Site Settings -> Sites page and click "Download Materials".


Import materials

History Of Import Materials


Export materials

Clone system

6. Se abrirá el explorador de Windows y se debe buscar el archivo con la extensión .dme “DAS_3SHAPE_V5.dme”, seleccionar el archivo y hacer click en abrir.

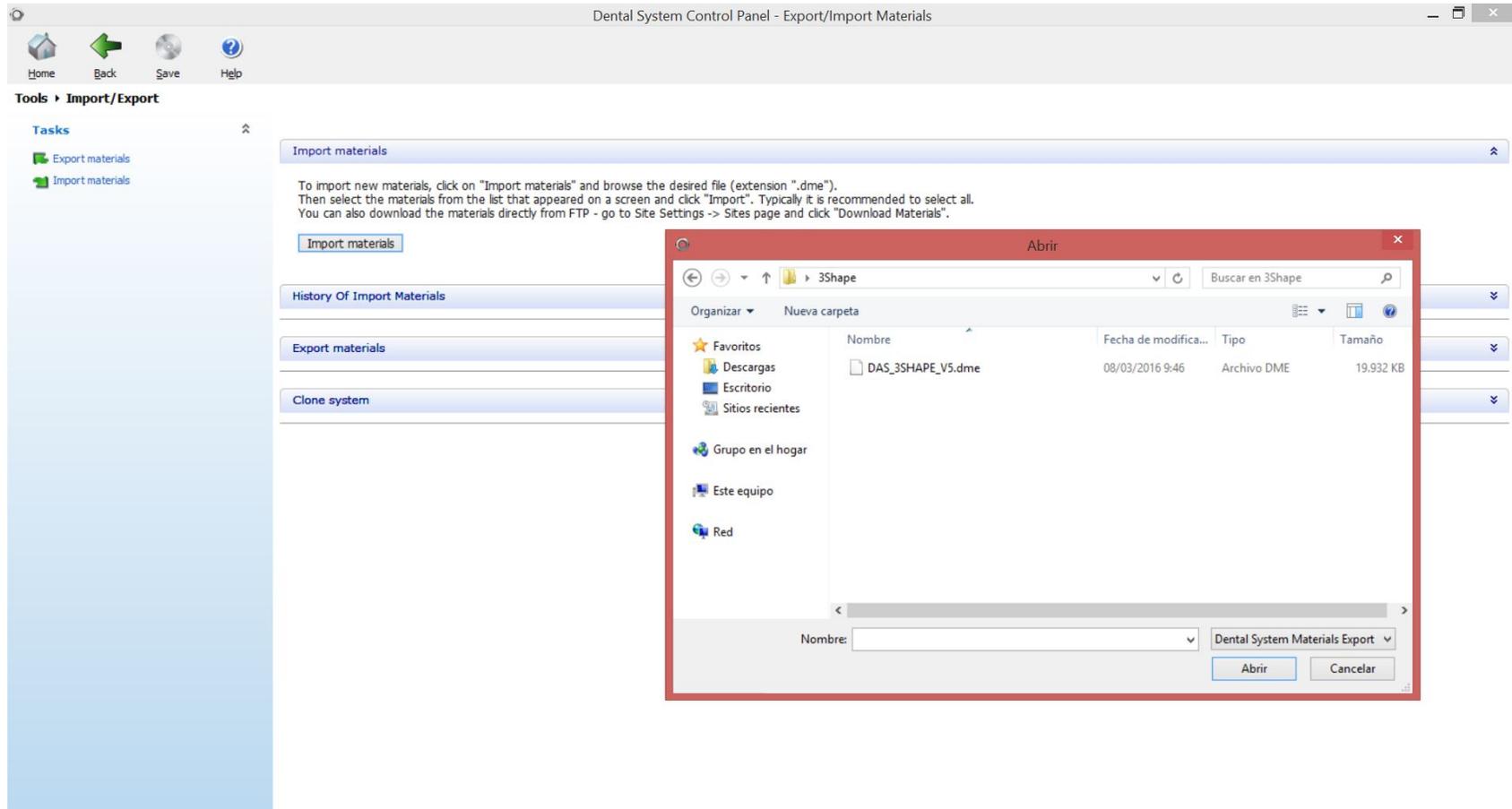

7. Las librerías de las interfases con sus components está lista para su uso.

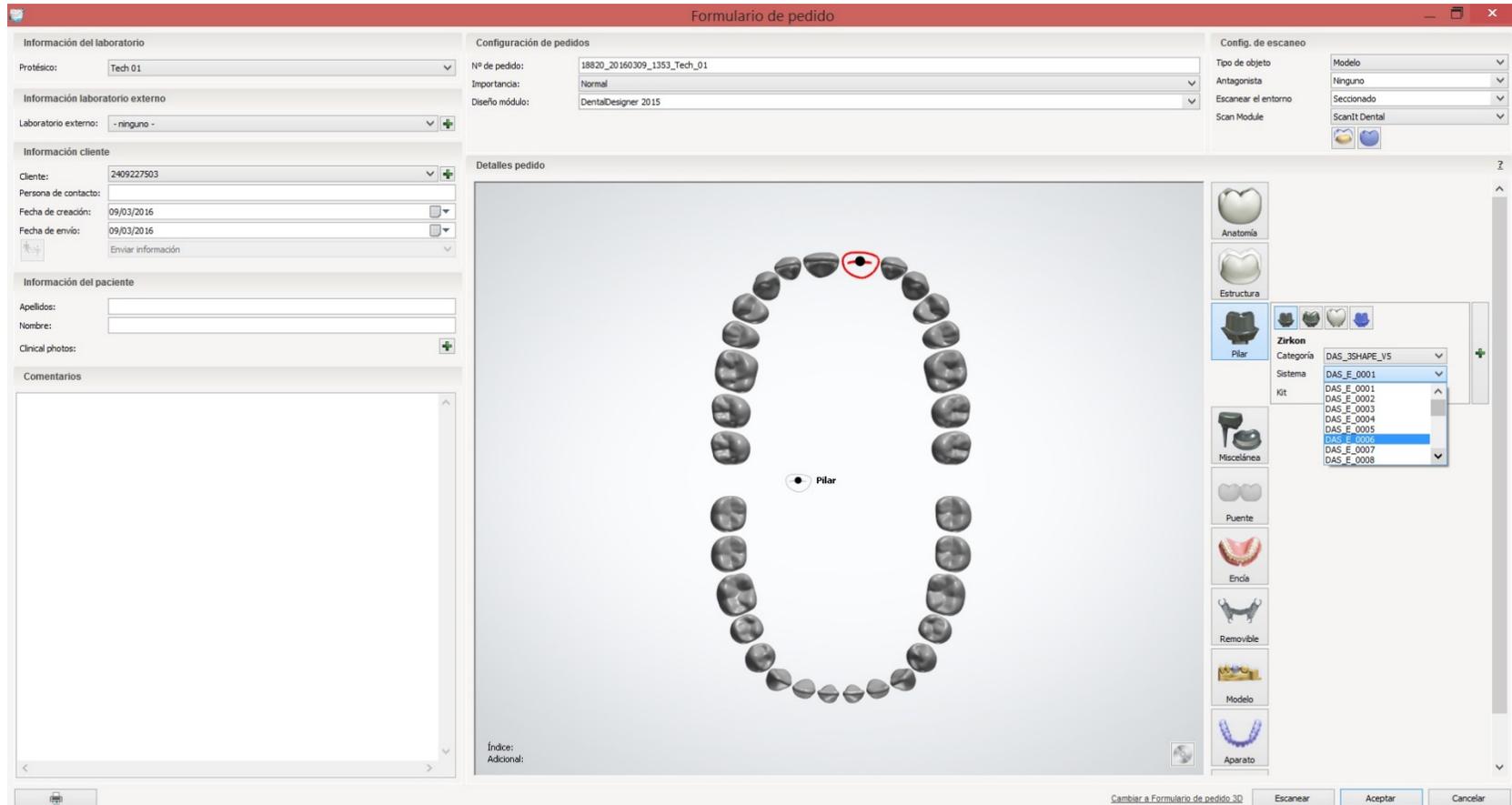

Nota: Si ya tiene instalada una versión de la biblioteca de DAS, borrar completamente el archivo .dme e instalar la nueva biblioteca siguiendo las instrucciones.

