


GUIDELINE TO DOWNLOAD AND INSTALL THE LIBRARY OF CAD FILES OF 3.0 DYNAMIC TITANIUM BASES FOR EXOCAD

exocad



1. Request the files for Exocad to the following e-mail: *das@dynamicabutment.com*, including your contact details. Enter in the Dropbox link provided by Dynamic Abutment Solutions and copy “DAS_EXOCAD_VO4_signed.7z.rar” folder.

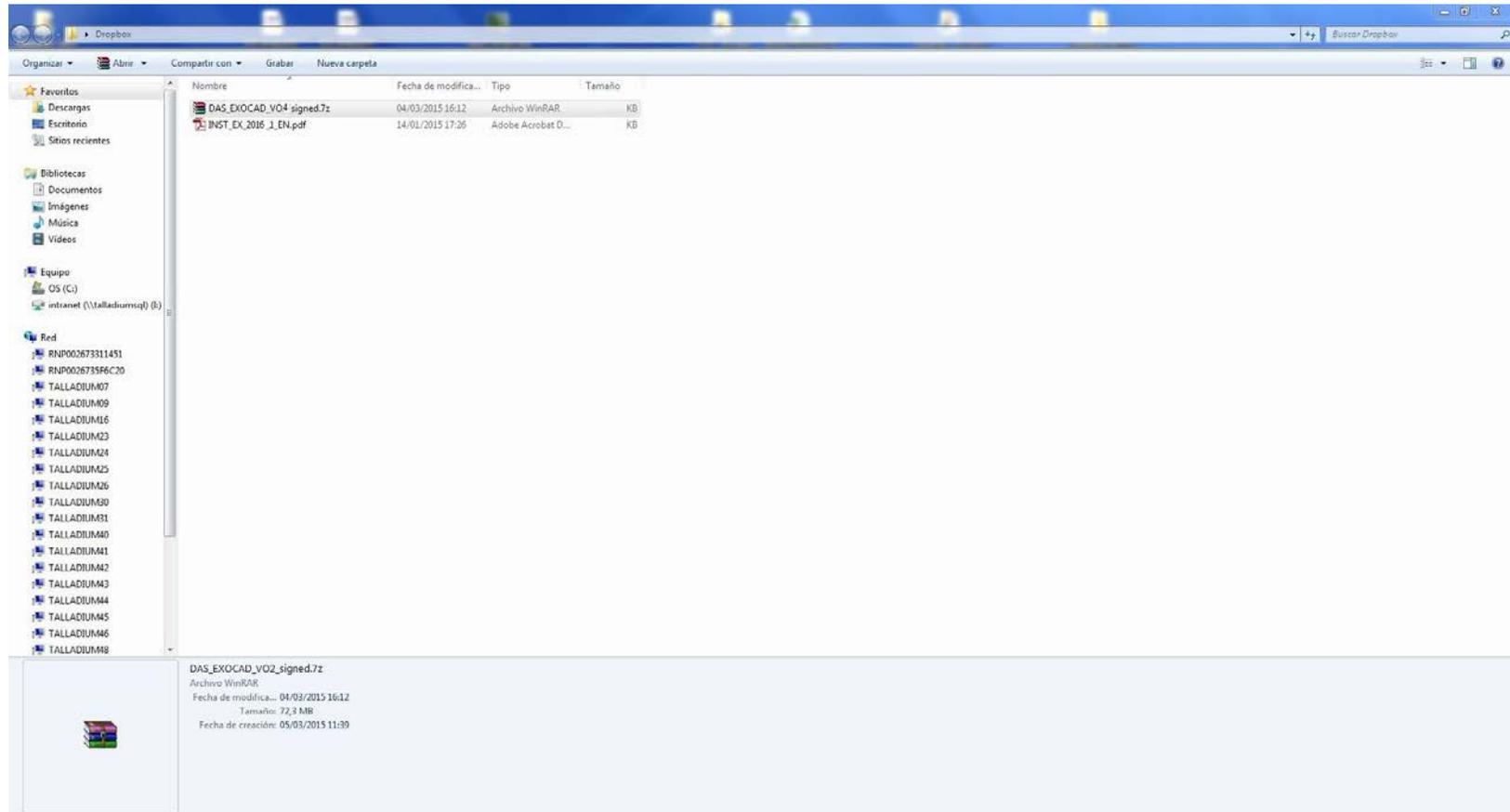

2. Paste .rar file and unzip wherever you want, for example at desktop, and you will get the folder “DAS_EXOCAD_VO4_signed.7z”.



3. After copy the folders that are in “DAS_EXOCAD_VO4”, and paste them in the following index: “Exocad-DentalCAD/DentalCADApp/library/implant”.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
DAS_E_0001	10/02/2016 8:33	Carpeta de archivos	
DAS_E_0002	10/02/2016 8:46	Carpeta de archivos	
DAS_E_0003	10/02/2016 8:57	Carpeta de archivos	
DAS_E_0004	10/02/2016 9:15	Carpeta de archivos	
DAS_E_0005	10/02/2016 9:28	Carpeta de archivos	
DAS_E_0006	10/02/2016 9:50	Carpeta de archivos	
DAS_E_0007	10/02/2016 10:01	Carpeta de archivos	
DAS_E_0008	01/09/2015 15:27	Carpeta de archivos	
DAS_E_0009	10/02/2016 10:11	Carpeta de archivos	
DAS_E_0010	10/02/2016 10:19	Carpeta de archivos	
DAS_E_0011	10/02/2016 10:34	Carpeta de archivos	
DAS_E_0012	17/08/2015 13:51	Carpeta de archivos	
DAS_E_0013	10/02/2016 11:54	Carpeta de archivos	
DAS_E_0014	17/08/2015 13:51	Carpeta de archivos	
DAS_E_0015	17/08/2015 13:52	Carpeta de archivos	
DAS_E_0016	10/02/2016 12:12	Carpeta de archivos	
DAS_E_0017	10/02/2016 12:22	Carpeta de archivos	
DAS_E_0018	21/01/2016 8:43	Carpeta de archivos	
DAS_E_0019	21/01/2016 8:57	Carpeta de archivos	
DAS_E_0020	21/01/2016 9:10	Carpeta de archivos	
DAS_E_0021	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0022	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0023	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0024	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0025	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0026	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0027	10/02/2016 15:32	Carpeta de archivos	
DAS_E_0028	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0029	10/02/2016 15:47	Carpeta de archivos	
DAS_E_0030	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0031	21/01/2016 11:56	Carpeta de archivos	
DAS_E_0032	21/01/2016 12:56	Carpeta de archivos	
DAS_E_0033	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	
DAS_E_0034	21/01/2016 13:17	Carpeta de archivos	
DAS_E_0035	17/08/2015 13:53	Carpeta de archivos	

43 elementos

Estado sin conexión: En línea
Disp. sin conexión: No disponible

Note: If you already have a DAS library version, remove completely the files and install the new library following the instructions.



4. Start Exocad with a new project and verify that the libraries are installed.

